

REINIGUNG UND DESINFEKTION DER TRANSPORTLIEGE LX30



REINIGUNG UND DESINFEKTION DER LIEGE

Reinigen Sie die Liege mit warmem Wasser und Neutralreiniger und trocknen Sie die Oberflächen gründlich mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie ein Desinfektionsspray oder Desinfektionstücher.

Die Aufbereitung durch eine Bettenwaschanlage ist generell unbedenklich, jedoch rät der Hersteller davon ab, da sich an der Liege abnehmbare Anbauteile befinden, welche durch die Anlage beschädigt werden können.

Die Liege sollte nach jedem Waschvorgang wieder trocken gerieben werden, da sich sonst Wasserablagerungen in der Verkleidung ansammeln könnte.

Geeignete Desinfektionsmittel: quartäre Ammoniumverbindungen, Isopropylalkohol, Chlorbleiche 0,5 % und Phenole.

Das Flächen-Desinfektionsmittel Incidin PLUS von Ecolab ist für die LX30 Patienten-Transportliege bedenkenlos geeignet.

ACHTUNG: DESINFEKTIONSPRODUKTE SIND GENERELL ÄTZEND!

Waschen Sie nach der Desinfektion die Oberflächen der Liege mit sauberem, warmem Wasser ab und trocknen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch.

HINWEIS: Es wird empfohlen, an der Liege nur CE-zertifizierte Reinigungsmittel zu verwenden.

HINWEIS: Verdünnen Sie alle Desinfektionsmittel entsprechend der Anleitung des Herstellers.

Wird die Liege nach der Desinfektion nicht richtig abgewaschen und abgetrocknet, können ätzende Rückstände zurückbleiben, die die Liege beschädigen könnten.

Folgende Reinigungsmittel sollen NICHT bei der Reinigung der Liege benutzt werden:

- Stark ausbleichende Desinfektionslösungen
- Organische starke Lösungsmittel (z.B.: Spiritus)
- Aggressives Pulver oder andere aggressive Materialien

Was die Liege NICHT verträgt:

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder harten Objekten
- Die Matratze oder das Polster sollten erst nach vollständiger Trocknung wieder auf der Liegefläche angebracht werden