


# GEBRAUCHSANWEISUNG


## Prone Head System Plus

Zur Verwendung mit der Kopfschale Prone Face Plus, um das Gesicht des Patienten in Bauchlage optimal zu unterstützen.


*For use with Prone Face Plus cushion to optimally support the patient in prone position.*

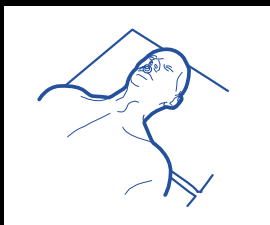


**1** Tubus in Rückenlage diskonnektieren.  
*With patient supine, disconnect ET tubing.*

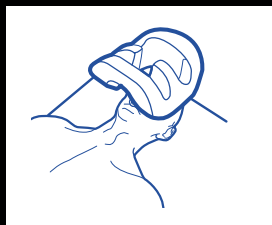


**2** Kopfschale auf dem Gesicht des Patienten positionieren.  
*Place cushion onto patient's face.*

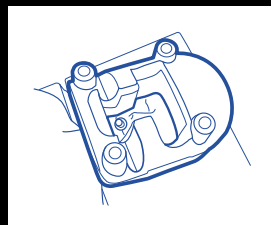


**3** Helm auf der Kopfschale platzieren.\*  
*Place helmet over cushion.\**

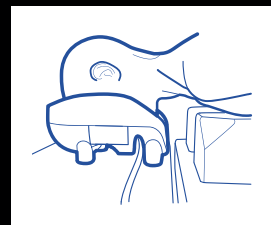

**4** Patient in Bauchlage bringen und Tubus konnektieren.  
*Turn patient into prone position and reconnect ET tubing.*

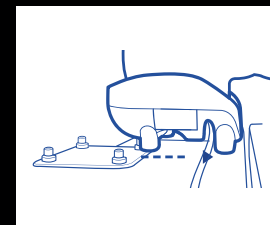

**5** Helm anheben, um ihn mit dem Spiegel zu verbinden.  
*Lift helmet and locate onto mirror's cogs.*

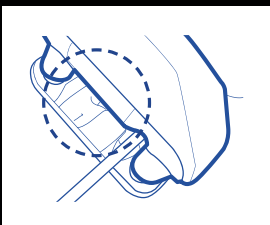

**6** Position des Gesichts mithilfe des Spiegels kontrollieren.  
*Check face is correctly positioned in cushion.*



**7** Schrauben so einstellen, dass der Nacken in einer neutralen Position ist.  
*Adjust cogs to obtain neutral neck line.*



★ Sicherstellen, dass der Tubus frei liegt.  
*Ensure tubing is not trapped between the cushion and patient's face.*

### Reinigungshinweis *Cleaning instructions*


Waschen Sie den Spiegel ausschließlich mit warmem Seifenwasser oder standardmäßigen Desinfektionstüchern. Das System ist nicht autoklavierbar.

*Clean with warm soapy water or standard hospital wipes. Do not autoclave.*

**LOT**

 **92243**

**92243**

 Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

**EC REP** Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin K78 X5P8 Ireland



nicht steril  
*non sterile*



latex-frei  
*latex-free*



Beilage beachten  
*note attachment*



CE-zertifiziert  
*CE-certified*



Medizinprodukt  
*Medical device*



wiederverwendbar  
*reusable*

Importeur/Importer:

**nordiska+**  
helping people care

Victoria Höhe 1  
D-51645 Gummersbach  
T +49 (0) 2261-9891-0  
F +49 (0) 2261-9891-111  
info@nordiska.de  
www.nordiska.de