


GEBRAUCHSANWEISUNG

Prone Head System Plus


Zur Verwendung mit der Kopfschale Prone Face Plus, um das Gesicht des Patienten in Bauchlage optimal zu unterstützen.

Για χρήση μαζί με το μαξιλάρι Prone Face Plus για την βέλτιστη στήριξη του ασθενούς σε πρηνή θέση.

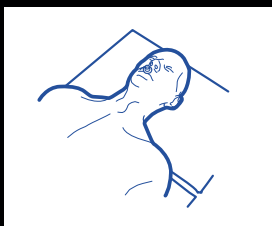


1 Tubus in Rückenlage diskonnektieren.

Με τον ασθενή σε ύπτια θέση, αφαιρέσετε τον ενδοτραχειακό σωλήνα.

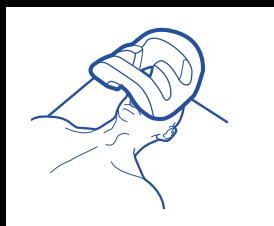


2 Kopfschale auf dem Gesicht des Patienten positionieren.

Τοποθετήστε το μαξιλάρι στο πρόσωπο του ασθενούς.

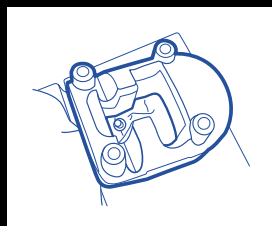


3 Helm auf der Kopfschale platzieren.*

Τοποθετήστε το κέλυφος πάνω από το μαξιλάρι*.

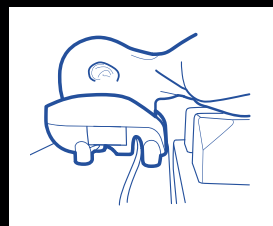


4 Patient in Bauchlage bringen und Tubus konnektieren.

Γυρίστε το ασθενή σε πρηνή θέση και επανασυνδέστε τον ενδοτραχειακό σωλήνα.

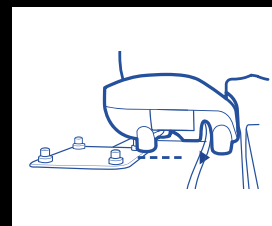

5 Helm anheben, um ihn mit dem Spiegel zu verbinden.

Σηκώστε το κέλυφος και τοποθετήστε το στις υποδοχές του καθρέφτη.

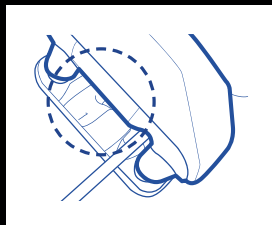


6 Position des Gesichts mithilfe des Spiegels kontrollieren.

Ελέγξτε ότι το πρόσωπο είναι σωστά τοποθετημένο στο μαξιλάρι.



7 Schrauben so einstellen, dass der Nacken in einer neutralen Position ist.

Ρυθμίστε τις βίδες ώστε να επιτευχθεί μια ουδέτερη στάση του αυχένα.

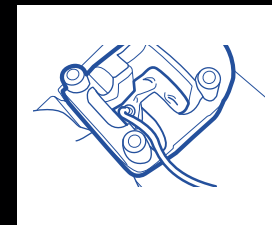

* Sicherstellen, dass der Tubus frei liegt.

Διασφαλίστε ότι ο ενδοτραχειακός σωλήνας δεν είναι παγιδευμένος ανάμεσα στο μαξιλάρι και στο πρόσωπο του ασθενούς.

Reinigungshinweis

Οδηγίες καθαρισμού

Waschen Sie den Spiegel ausschließlich mit warmem Seifenwasser oder standardmäßigen Desinfektions-tüchern. Das System ist nicht autoklavierbar.

Γλύψτε τον καθρέφτη μόνο με ζεστό σαπουνόνερο ή με τα συνηθισμένα απολυμαντικά μαντηλάκια. Το σύστημα δεν μπορεί να αποστειρωθεί με αυτάνοσο.

LOT

92243

Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

EC REP Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin K78 X5P8 Ireland



nicht steril
Μη αποστειρωμένο



latex-frei
Χωρίς λάτεξ



Beilage beachten
Μίας χρήσεως μόνο



CE-zertifiziert
Πιστοποίηση-CE



Medizinprodukt
Ιατρική συσκευή



wiederverwendbar
επαναχρησιμοποίηση

Importeur/Eισαγωγέας:

nordiska+
helping people care

Victoria Höhe 1
D-51645 Gummersbach
T +49 (0) 2261-9891-0
F +49 (0) 2261-9891-111
info@nordiska.de
www.nordiska.de