



GEBRAUCHSANWEISUNG

Prone Head System Plus


Zur Verwendung mit der Kopfschale Prone Face Plus, um das Gesicht des Patienten in Bauchlage optimal zu unterstützen. À utiliser avec la coque de tête Prone Face Plus pour couvrir le visage du patient en décubitus ventral pour fournir un soutien optimal.

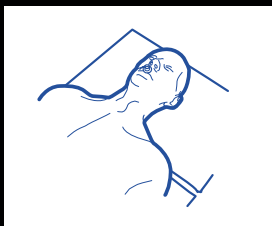


1 Tubus in Rückenlage diskonnektieren.
Déconnectez le tube en position couchée.

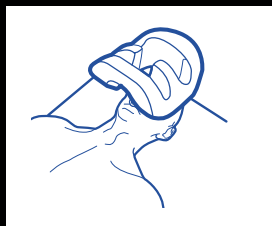


2 Kopfschale auf dem Gesicht des Patienten positionieren.
Coquille de tête sur le visage du patient.

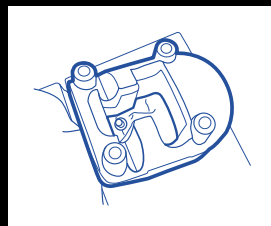


3 Helm auf der Kopfschale platzieren.*
*Casque sur la tête lieu.**

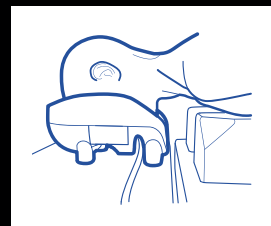

4 Patient in Bauchlage bringen und Tubus konnektieren.
Mette le patient en décubitus ventral et connecter le tube.

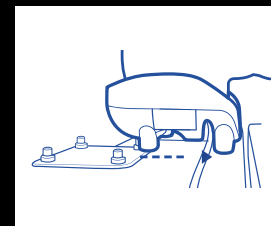


5 Helm anheben, um ihn mit dem Spiegel zu verbinden.
Soulevez le casque pour le relier au miroir.

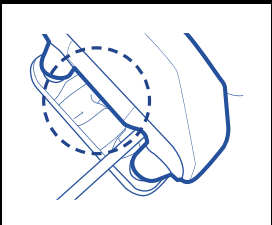

6 Position des Gesichts mithilfe des Spiegels kontrollieren.
Utilisez le miroir pour vérifier la position du visage.



7 Schrauben so einstellen, dass der Nacken in einer neutralen Position ist.
Ajustez les vis de manière à ce que le cou soit en position neutre.

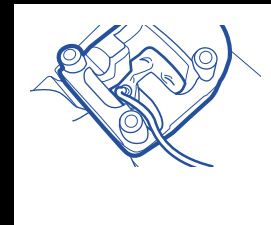

★ Sicherstellen, dass der Tubus frei liegt.
Assurez-vous que le tube est exposé.

Reinigungshinweis

Instructions de nettoyage

Waschen Sie den Spiegel ausschließlich mit warmem Seifenwasser oder standardmäßigen Desinfektionstüchern. Das System ist nicht autoklavierbar.

Nettoyez le miroir uniquement avec de l'eau chaude savonneuse ou des lingettes désinfectantes standard. Le système n'est pas autoclavable.

LOT

 **92243**

92243

 Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

EC REP Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin K78 X5P8 Ireland



nicht steril
non stérile



latex-frei
sans latex



Beilage beachten
encart de note



CE-zertifiziert
certifié CE



Medizinprodukt
Dispositif médical



wiederverwendbar
réutilisable

Importeur/Importeur:

nordiska+
helping people care

Victoria Höhe 1
D-51645 Gummersbach
T +49 (0) 2261-9891-0
F +49 (0) 2261-9891-111
info@nordiska.de
www.nordiska.de