
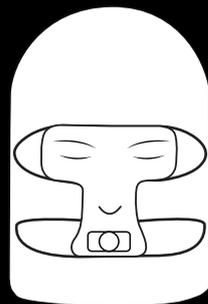


PRONE FACE CHILD

Das Prone Face Child wurde speziell für Kinder entwickelt und stützt Stirn und Wangen des Patienten. Stellen Sie sicher, dass die Augenbrauen sichtbar sind, um direkten Druck auf die Augen zu vermeiden. Geeignet für Kinder unter 8 Jahren*.

Prone Face Child was especially developed for kids and offers support to your patient's forehead and cheeks. Ensure the eyebrows are visible to avoid direct pressures to the eyes. Suitable for kids younger than 8 years.*

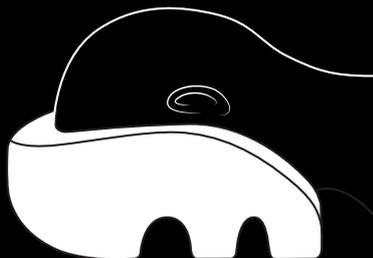

* Platzieren Sie das Kissen wie abgebildet auf dem Gesicht des Patienten und stellen Sie sicher, dass die Augenbraue sichtbar ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Wangenknochen und die Stirn vom Kissen gestützt werden. Nicht nutzen, wenn das Gesicht des Patienten nicht die Auflagen für Stirn und Wangen berührt.

** Place the cushion onto the patients face as shown above, ensure the eye brow line is visible. Ensure the cheek bone and forehead are supported on the cushion. Do not use if the patients face does not touch the forehead/cheek support.*



nicht steril
non sterile



latex-frei
latex-free



Einwegprodukt
single use only



CE-zertifiziert
CE-certified



Medizinprodukt
Medical device

Best.-Nr. 92241

Importeur/Importer:

nordiska+

helping people care

Victoria Höhe 1
D-51645 Gummersbach

T +49 (0) 2261-9891-0
F +49 (0) 2261-9891-111

info@nordiska.de
www.nordiska.de




Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail
Road, Burscough, L40 8JY, UK



Care Surgical Supplies Limited, 69 Esker Woods
Drive, Lucan, Co Dublin, K78PX45, Ireland

POSITIONIERUNGSHINWEIS

Positioning advice

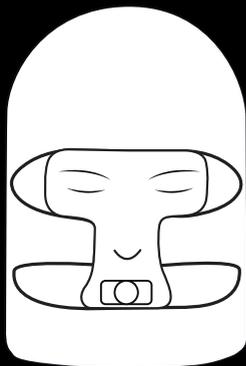

RICHTIGE POSITION

- Stirn - die Augenbrauen müssen sichtbar sein
- Augen - kein Druck auf den Bereich unterhalb der Augen
- Wangen - die Wangenknochen müssen auf dem Kissen aufliegen
- Kinn - das Kinn darf auf dem Kissen nicht aufliegen

Correct positioning



- Forehead - eyebrows must be visible
- Eyes - no pressure on the soft tissue below the eyes
- Cheeks - must be supported on the cheek bone
- Chin - not resting on the foam

WÄHREND DER OPERATION

- Stellen Sie sicher, dass alle Schläuche frei liegen und nicht auf das Gesicht drücken
- Augen und Augenbrauen müssen sichtbar sein und das Kissen nicht berühren
- Nutzen Sie den Spiegel, um das Gesicht des Patienten und den Tubus zu beobachten
- Überprüfen Sie alle 30 Minuten die Position des Patienten

During the operation

- Ensure that the tubes are free and not pressing against the skin
- Eyes and eyebrows must be visible and not touching the foam
- Use the mirror to monitor the patient's face and tubing
- Check if the patient is correctly positioned every 30 minutes

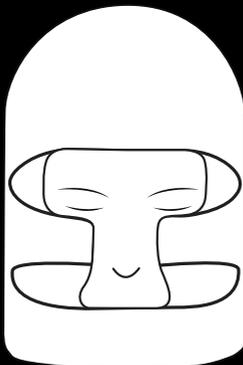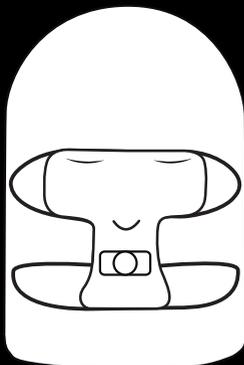

FALSCH E POSITIONEN

Incorrect positioning