


GEBRAUCHSANWEISUNG

Prone Head System Plus




Zur Verwendung mit der Kopfschale Prone Face Plus, um das Gesicht des Patienten in Bauchlage optimal zu unterstützen.


Til brug sammen med hovedskålen Prone Face Plus til beskyttelse af patientens ansigt, når patienten ligger på maven.

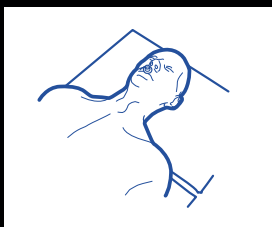


1 Tubus in Rückenlage diskonnektieren.
Frakobl røret, når patienten ligger på ryggen.

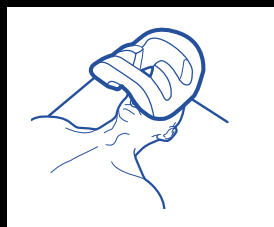


2 Kopfschale auf dem Gesicht des Patienten positionieren.
Læg hovedskålen på patientens ansigt.

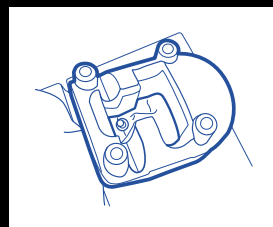


3 Helm auf der Kopfschale platzieren.*
*Læg hjelmen på hovedskålen.**

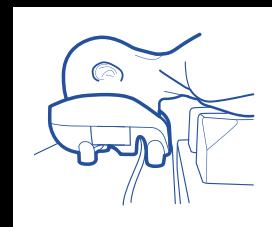

4 Patient in Bauchlage bringen und Tubus konnektieren.
Læg patienten på maven, og tilslut røret.

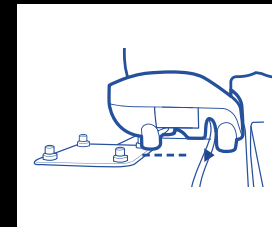


5 Helm anheben, um ihn mit dem Spiegel zu verbinden.
Løft hjelmen for at forbinde den med spejlet.

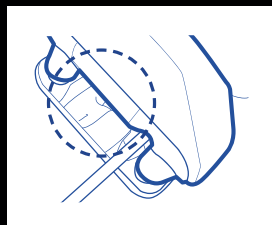

6 Position des Gesichts mithilfe des Spiegels kontrollieren.
Kontroller ansigtets position ved hjælp af spejlet.



7 Schrauben so einstellen, dass der Nacken in einer neutralen Position ist.
Indstil skruerne, så nakken er i en neutral position.

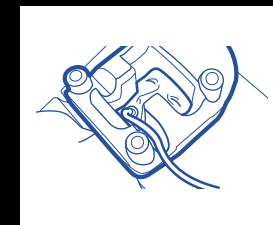

* Sicherstellen, dass der Tubus frei liegt.
Sørg for, at røret er fritliggende.

Reinigungshinweis

Rengøringsvejledning

Waschen Sie den Spiegel ausschließlich mit warmem Seifenwasser oder standardmäßigen Desinfektionstüchern. Das System ist nicht autoklavierbar.

Spejlet må kun vaskes med varmt sæbevand eller standard desinficerende klude. Systemet kan ikke autoklaveres.

LOT

NON STERILE

92243

Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

EC REP Care Surgical Supplies Limited, 69 Esker Woods Drive, Lucan, Co Dublin, K78PX45, Ireland

NON STERILE

nicht steril
ikke steril

LATEX

latex-frei
latexfri

!

Beilage beachten
Læs indlægssejlen

CE

CE-zertifiziert
CE-certificeret

MD

Medizinprodukt
Medicinsk udstyr

2

wiederverwendbar
genanvendelig

Importeur/Importør:

nordiska+
helping people care

Victoria Höhe 1
D-51645 Gummersbach
T +49 (0) 2261-9891-0
F +49 (0) 2261-9891-111
info@nordiska.de
www.nordiska.de