


# GEBRAUCHSANWEISUNG


## Prone Head System

Zur Verwendung mit der Kopfschale Prone Face, um das Gesicht des Patienten in Bauchlage optimal zu unterstützen.


Til brug sammen med hovedskålen Prone Face til bedst beskyttelse af patientens ansigt, når patienten ligger på maven.

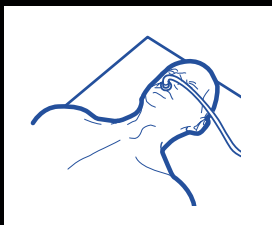


**1** Tubus bleibt angeschlossen.  
Røret forbliver tilsluttet.

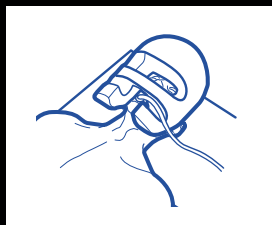


**2** Kopfschale auf dem Gesicht des Patienten positionieren.  
Læg hovedskålen på patientens ansigt.

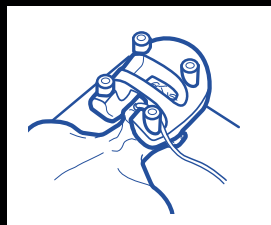


**3** Helm auf der Kopfschale platzieren.\*  
Læg hjelmen på hovedskålen.\*

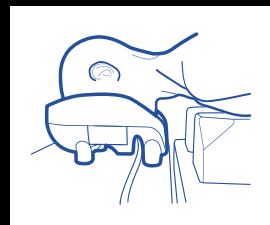

**4** Patienten in Bauchlage bringen.  
Læg patienten på maven.

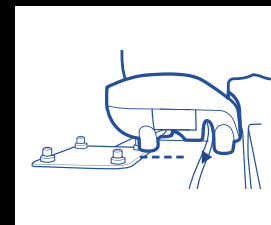


**5** Helm anheben, um ihn mit dem Spiegel zu verbinden.  
Løft hjelmen for at forbinde den med spejlet.

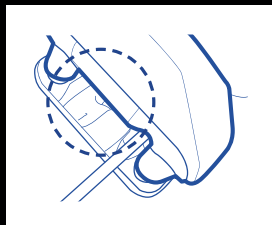

**6** Position des Gesichts mithilfe des Spiegels kontrollieren.  
Kontroller ansigtets position ved hjælp af spejlet.



**7** Schrauben so einstellen, dass der Nacken in einer neutralen Position ist.  
Indstil skruerne, så nakken er i en neutral position.

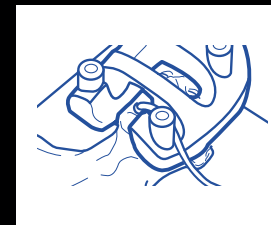

★ Sicherstellen, dass der Tubus frei liegt.  
Sørg for, at røret er fritliggende.

### Reinigungshinweis

Rengøringsvejledning

Waschen Sie den Spiegel ausschließlich mit warmem Seifenwasser oder standardmäßigen Desinfektionstüchern. Das System ist nicht autoklavierbar.

Spejlet må kun vaskes med varmt sæbevand eller standard desinficerende klude. Systemet kan ikke autoklaveres.

LOT

NON STERILE

92268

Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

EC REP Care Surgical Supplies Limited, 69 Esker Woods Drive, Lucan, Co Dublin, K78PX45, Ireland



nicht steril  
ikke steril



latex-frei  
latexfri



Beilage beachten  
Læs indlægssejlen



CE-zertifiziert  
CE-certificeret



Medizinprodukt  
Medicinsk udstyr



wiederverwendbar  
genanvendelig

Importeur/Importer:

**nordiska**

helping people care

Victoria Höhe 1  
D-51645 Gummersbach  
T +49 (0) 2261-9891-0  
F +49 (0) 2261-9891-111  
info@nordiska.de  
www.nordiska.de